

PRUEBA INDIVIDUAL COVID-19 (IgG/IgM)



CE



PRUEBA APROBADA POR



efectividad
97.5%



Resultados en
menos de 15 min

HECHO EN
CHINA

PRUEBA INDIVIDUAL COVID-19 (IgG/IgM)



Industrial Training and Supplies de México, presenta:
LA PRUEBA INDIVIDUAL MÁS VENDIDA EN EL MUNDO
POR SU ALTO NIVEL DE EXACTITUD del laboratorio Realy Tech.

Caja con test individual / Un sólo test

El dispositivo de prueba rápida IgG/IgM 2019-nCoV/COVID-19 es una cromatografía de inmunoensayo rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM de la enfermedad por coronavirus 2019 en sangre entera humana, suero o plasma como ayuda en el diagnóstico de infecciones por COVID-19.

Para un correcto uso de este kit seguir las instrucciones especificadas en el folleto informativo.

Este dispositivo de prueba contiene 3 tipos de líneas diferentes:

A) letra C corresponde a control de calidad.

B) IgM, correspondientes a anticuerpo IgM.

C) IgG, correspondiente a anticuerpo IgG.

Si las líneas de prueba IgG e IgM no están coloreadas, se muestra un resultado negativo.

Si la línea de control de calidad C no aparece, el resultado de la prueba no es válido y la muestra debe analizarse nuevamente con otra tarjeta de prueba.

Revise la interpretación de resultado en manual de usuario o folleto informativo.

Resultados en:



Sumemos esfuerzos, La Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países que intensifiquen sus programas de pruebas como la mejor manera de frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

“Tenemos un mensaje simple para todos los países: prueba, prueba, prueba”, ha dicho Tedros en una conferencia de prensa en Ginebra. Sin pruebas, “los casos no podrían aislarse y la cadena de infección no se rompería”.

Incluye

1

- Dispositivo de prueba
- Buffer
- Pipeta de plástico desechable de 5 µL
- Inserto



INSTRUCCIONES DE PRUEBA

1. Llevar el sachet a temperatura ambiente antes de abrirla. Retirar el dispositivo de prueba del sachet sellado y usarlo lo antes posible.

2. Colocar el dispositivo de prueba en una superficie limpia y nivelada.

- Para muestras de suero o plasma:


Usando la pipeta desechable de 5µL proporcionada, y transferir 1 gota de suero/plasma al dispositivo de prueba, luego agregar 1 gota de Buffer e iniciar el temporizador.

- Para muestras de sangre entera (venopunción / punción en el dedo):

Usando la pipeta desechable de 5µL proporcionada, y transferir 2 gotas de sangre entera (aproximadamente 20 µL) al pocillo de muestra del dispositivo de prueba, luego agregar 1 gota de Buffer e iniciar el temporizador.

Nota: Las muestras también se pueden aplicar usando una micropipeta.

3. Esperar a que aparezcan las líneas de color. **Leer los resultados a los 10 minutos. No interprete el resultado después de 15 minutos.**

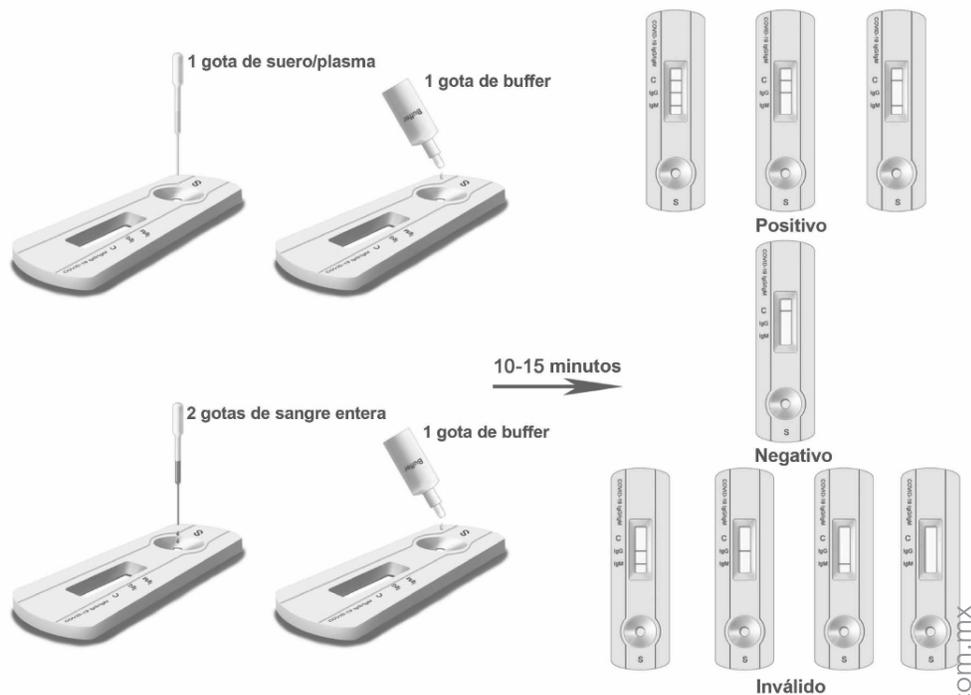

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

1. El dispositivo de prueba rápida IgG/IgM 2019-nCoV/COVID-19 está diseñado para usarse solo con muestras de sangre entera, suero o plasma humano.
2. Solo se recomiendan muestras transparentes no hemolizadas para esta prueba. El suero o el plasma deben separarse lo antes posible para evitar la hemólisis.
3. Realizar la prueba inmediatamente después de la recolección de la muestra. No dejar las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8 ° C por hasta 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero o plasma deben mantenerse por debajo de -20 ° C. La sangre entera recolectada por punción venosa debe almacenarse a 2-8 ° C si la prueba se va a realizar dentro de los 2 días posteriores a la recolección. No congelar muestras de sangre entera. La sangre entera recolectada por punción digital debe analizarse inmediatamente.
4. Los recipientes que contienen anticoagulantes como EDTA, citrato o heparina deben usarse para el almacenamiento de sangre entera.
5. Llevar las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las muestras congeladas deben estar completamente descongeladas y mezcladas bien antes de la prueba. Evitar congelar y descongelar repetidamente las muestras.
6. Si se van a enviar muestras, empaquetarlas de acuerdo con todas las regulaciones aplicables para transporte de agentes etiológicos.
7. Los sueros ictericos, lipémicos, hemolizados, tratados térmicamente y contaminados pueden causar resultados erróneos.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

1. El embalaje original debe almacenarse a 4 -30 ° C, para evitar la luz, mantener seco.
2. El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el sachet sellado. El dispositivo de prueba debe permanecer en el sachet sellado hasta su uso. **NO CONGELAR.**
3. No usar más allá de la fecha de vencimiento, especialmente a temperaturas superiores a 30 ° C o bajo condiciones de humedad, deben usarse inmediatamente una vez abierto.

PRECAUCIONES

1. Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No use el kit después de la fecha de vencimiento.
2. No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las muestras o los kits.
3. No utilice la prueba si el sachet está dañado.
4. Maneje todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los riesgos microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
5. Use ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección para los ojos cuando se analizan las muestras.
6. La prueba utilizada debe descartarse de acuerdo con las regulaciones locales.



Más de **1,000,000**
de pruebas entregadas

Algunos de nuestros **clientes satisfechos:**



90% de nuestros clientes
cotizan en la bolsa de valores



PRUEBA INDIVIDUAL COVID-19 (IgG/IgM)



10

pruebas

\$4,950 + IVA

Inversión Real
\$5,900 + IVA

20

pruebas

\$7,950 + IVA

Inversión Real
\$11,800 + IVA

50

pruebas

\$16,900 + IVA

Inversión Real
\$29,500 + IVA

1 a 9 pruebas individuales: \$590 pesos + IVA c/u

PRUEBA AVALADA POR:



Di no a la piratería

55 8606 6816

☎ 33 3121 1350

✉ contacto@industrialsupplies.com.mx

www.industrialsupplies.com.mx

No tenemos intermediarios no se deje sorprender

PRUEBA INDIVIDUAL COVID-19 (IgG/IgM)

Número de pruebas

Nombre: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

Dirección de envío: _____

Autorizado por:

Nombre: _____

E-mail: _____ Teléfono: _____

Puesto: _____

DATOS DE FACTURACIÓN

Razón Social : _____

RFC: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ C.P.: _____

Ciudad: _____

Estado _____

FORMA DE PAGO

- Transferencia Electrónica Déposito Bancario

MÉTODO DE PAGO:

Fecha de pago: _____

Uso del CFDI: _____

- Pago en Parcialidades Pago en una sola exhibición

POLÍTICA DE ENTREGA

5 días hábiles después de validar su pago

Prueba de alta demanda debido a su efectividad, periodo de entrega sujeto a cambios sin previo aviso.

DATOS DEPARTAMENTO DE PAGOS:

Nombre: _____

Puesto: _____

E- mail: _____

Teléfono: _____

Favor de enviar este formato por e-mail a:
contacto@industrialsupplies.com.mx

NO INCLUYE GASTOS DE ENVÍO

Forma de Pago

Cheque a nombre:

ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.C.

BBVA cta 0114051173

Transferencia Electrónica

012 320 00114051173 1

Pago con Tarjeta:



No se aceptan cancelaciones

En el presente documento manifiesto que cuento con la capacidad legal suficiente para la compra de este producto. Así mismo, manifiesto mi libre y total consentimiento, para comprometerme y obligarme frente a ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MÉXICO S.C. a pagar la cantidad manifestada en la sección correspondiente al precio total de las piezas que he adquirido aquí detalladas; en las formas y términos descritos en este documento.

Manifiesto que el presente documento comprende el total y único acuerdo de precio y objeto de la compra-venta celebrada con ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MÉXICO S.C., la cual ha tenido por objeto la adquisición de dicho producto.