

# PRUEBA NASOFARÍNGEA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO

STANDARD Q COVID-19 Ag by Laboratorio SD BIOSENSOR



Cada caja Incluye:

# 25

- Dispositivos de prueba (bolsa de aluminio individual)
- Hisopos estériles
- Buffer de extracción
- Boquillas



Resultados rápidos  
15-30 min



Detección del virus desde el día 1 al 14 con un **99.68%** efectividad



Fácil de Usar

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE)

SÍGUENOS EN:



# PRUEBA NASOFARÍNGEA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO

STANDARD Q COVID-19 Ag by Laboratorio SD BIOSENSOR



## LA SEGURIDAD, CONFIANZA Y SALUD DE NUESTROS CLIENTES SON PRIORIDAD.

La prueba STANDARD Q COVID-19 Ag mediante hisopado nasofaríngeo, puede detectar el virus desde el inicio de los síntomas hasta 14 días posteriores a los mismos con el fin de detectar el antígeno.

Estas pruebas tienen:

**Sensibilidad del 96.52%**

**Especificidad del 99.68%**

Se debe tomar en cuenta la respuesta inmune de cada persona y el tiempo de seroconversión, así como el historial clínico del paciente, detectando los síntomas presentes y complicaciones de salud que este pudiera tener. Además, es importante establecer la suspensión de cualquier tipo de medicamento al menos 48 horas antes de realizar cualquiera de estas pruebas.

**PROTEJA A SUS COLABORADORES POR MEDIO DE LA DETECCIÓN  
TEMPRANA DE POSIBLES CASOS DE COVID-19, ASEGURANDO SU PRONTA  
ATENCIÓN Y AISLAMIENTO.**

Resultados en:



## Incluye

25

- Dispositivos de prueba (bolsa de aluminio individual)
- Hisopos estériles
- Buffer de extracción
- Boquillas

## Beneficios

- Adecuado para puntos de atención
- Fácil de Usar
- Resultados rápidos en 30 minutos
- Almacenamiento a temperatura ambiente



### ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene el kit a temperatura ambiente, 2-30°C / 36-86°F, fuera del alcance de la luz solar directa. Los materiales del kit son estables hasta la fecha de caducidad impresa en la caja exterior.

No congelar el kit.

Las muestras pueden ser almacenadas a temperatura ambiente por hasta 1 hora o entre 2-8°C / 36-46°F por hasta 4 horas antes de efectuar la prueba.



## Procedimiento de preparación y prueba

1. Use ropa protectora personal desechable.



3. Una vez recolectada la muestra, mezclar con el buffer de extracción girando el hisopo al menos 5 veces.



5. Depositar 3 gotas de la mezcla homogenizada con la muestra y el buffer.



2. Recolecte la muestra nasofaríngea insertando un hisopo estéril dentro de la fosa nasal del paciente, rote el hisopo contra la pared posterior nasal/ nasofaríngea y retire el hisopo de la cavidad nasal.



4.- Una vez homogenizada la muestra, colocar la boquilla de protección.



6. Interpretar resultados de 15-30 minutos. **No leer antes de los 15 minutos ni posterior a los 30 minutos.**




## Interpretación de resultados

Negativo



Positivo

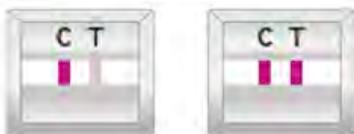

Inválido



Una marca de color aparecerá en la sección superior de la ventana de resultado para mostrar que la prueba funciona adecuadamente. Esta marca es la línea de antígeno COVID-19 (C).

Una marca de color aparecerá en la sección inferior de la ventana de resultado. Esta marca es la línea de antígeno COVID-19 (T).

Incluso si la línea control es tenue o la línea de prueba no es uniforme, la prueba debe ser considerada correcta y en resultado de la prueba debe ser interpretado como un resultado positivo.

En caso de no aparecer la banda en la línea de control "C" se considera resultado "INVÁLIDO". Se sugiere volver a repetir la prueba con un dispositivo nuevo.



Más de **1,000,000**  
de pruebas entregadas

Algunos de nuestros **clientes satisfechos:**



**90%** de nuestros clientes  
cotizan en la bolsa de valores

# PRUEBA NASOFARÍNGEA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO

STANDARD Q COVID-19 Ag by Laboratorio SD BIOSENSOR



10

cajas

20

cajas

|  |  |
|--|--|
| <p><b>\$169,000 + IVA</b></p> <hr/> <p>Inversión Real<br/><b>\$179,000 + IVA</b></p> | <p><b>\$318,000 + IVA</b></p> <hr/> <p>Inversión Real<br/><b>\$348,000 + IVA</b></p> |
|--|--|

1 a 9 cajas: \$17,900 pesos + IVA c/u

1 caja contiene: 25 pruebas

En la compra de cada caja **SE INCLUYE Seminario Online**  
en Vivo con valor de 8600.00 pesos , sin costo :

(Se entrega constancia DC3 válida ante cualquier auditoría de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, material didáctico de alto valor y la exposición de un experto en la materia).

*Juntos pongamos un alto a esta pandemia , México es el país que menos pruebas aplica , es responsabilidad de todos hacer que Esto termine pronto.*

PRUEBA AVALADA POR:



Instituto de Diagnóstico y Referencia  
Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez  
Báez" (InDRE)



33 27137524  
33 3121 1350

contacto@industrialsupplies.com.mx

www.industrialsupplies.com.mx  
No tenemos intermediarios no se deje sorprender

www.industrialsupplies.com.mx

# PRUEBA NASOFARÍNGEA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO

STANDARD Q COVID-19 Ag by Laboratorio SD BIOSENSOR

Número de cajas

---

Nombre: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Dirección de envío: \_\_\_\_\_

## Autorizado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

## DATOS DE FACTURACIÓN

Razón Social : \_\_\_\_\_

RFC: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado \_\_\_\_\_

## FORMA DE PAGO

- Transferencia Electrónica       Déposito Bancario

## MÉTODO DE PAGO:

Fecha de pago: \_\_\_\_\_

Uso del CFDI: \_\_\_\_\_

- Pago en Parcialidades       Pago en una sola exhibición

## DATOS DEPARTAMENTO DE PAGOS:

Nombre: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

E- mail: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Favor de enviar este formato por e-mail a:  
contacto@industrialsupplies.com.mx

## NO INCLUYE GASTOS DE ENVÍO

### Forma de Pago

Cheque a nombre:

**ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.C.**

BBVA cta 0114051173

Transferencia Electrónica

012 320 00114051173 1

**Pago con Tarjeta:**



**No se aceptan cancelaciones**

En el presente documento manifiesto que cuento con la capacidad legal suficiente para la compra de este producto. Así mismo, manifiesto mi libre y total consentimiento, para comprometerme y obligarme frente a ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MÉXICO S.C. a pagar la cantidad manifestada en la sección correspondiente al precio total de las piezas que he adquirido aquí detalladas; en las formas y términos descritos en este documento.

Manifiesto que el presente documento comprende el total y único acuerdo de precio y objeto de la compra-venta celebrada con ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MÉXICO S.C., la cual ha tenido por objeto la adquisición de dicho producto.